

MANUAL CABESTRILLOS

Información general del Producto

El Producto sanitario que usted acaba de adquirir ha sido fabricado en base a los criterios de calidad recogidos en el Real Decreto 1591/2009. Así mismo cumple con todos los requisitos esenciales que le son de aplicación.

Indicaciones

Descarga del hombro y clavícula, procesos inflamatorios que requieran inmovilización, fracturas de clavícula y húmero, sujeción de brazos escayolados, esguinces y luxaciones del miembro superior.

Elección de la talla

La elección correcta de la talla es de vital importancia para que el presente Producto cumpla correcta y eficazmente las funciones para las cuales ha sido diseñado.

Dicha elección es responsabilidad del técnico y ha de ser llevada a cabo por un profesional sanitario cualificado. Para ello bastará con medir la longitud del antebrazo (medido desde codo a muñeca y consultar el cuadro de tallas situado en el anverso de esta hoja

Una vez realizados los correspondientes ajustes por el técnico, preservarlos durante la vida útil del producto.

Utilización

A pesar de que los materiales utilizados en el diseño y fabricación de este Producto son hipoalérgicos, cabe la posibilidad de que surjan problemas de hipersensibilización a algunos de sus componentes (alergias, dermatitis de contacto, etc.) o erosiones en la piel. En caso de que se manifestasen alguno de estos síntomas acuda a su médico o al técnico correspondiente.

Se recomienda continuar con los ejercicios de rehabilitación especificados por el médico (si los hubiere) para evitar un aumento de la rigidez articular.

Un uso prolongado podría provocar molestias en la zona del cuello. Esta órtesis es simétrica y puede utilizarse indistintamente en ambos brazos.

Envasado

El envase de este producto garantiza una protección para no sufrir daños ni contaminación en su transporte, almacenamiento y utilización, siempre que éstos se realicen en condiciones sanitarias y ambientales adecuadas y se evite su exposición a la luz solar directa.

Reutilización y modificaciones

Este producto NO ha sido diseñado para ser reutilizado por varias personas y cualquier modificación que se realice sobre el mismo que no haya sido expresamente autorizada por el fabricante eximirá a éste de cualquier responsabilidad que pueda derivarse de su utilización. Así como del uso de esta prenda con un fin distinto para el cual fue fabricada. La duración aproximada de utilización de este Producto, en las condiciones descritas, es de 1 año.

Lavado y secado

Lavar siempre a mano, en agua templada, utilizar jabón neutro. En ningún caso se debe utilizar lejía ni lavar en seco.

Una vez lavada, extienda la prenda sobre una superficie plana envuelta en una toalla y déjela secar.

Debido a que se trata de un producto inflamable, no lo exponga directamente al sol ni a una fuente de calor. Ponga especial atención en secar bien los elementos metálicos de la prenda (si ésta los posee) y compruebe que no han quedado alterados tras el proceso de lavado.

Distribuido por:

EUROPODEX SL.

Licencia nº: 4672 P.S.

Polígono Promosa – Calle W5, Nave 13

33211 Gijón - Asturias – ESPAÑA –

TEL. 985990833 FAX. 985 990263

ventas@europodex.com

www.europodex.com