

Silla de Ruedas Plegable para ducha / aseo Cymam

Modelo “ERCINA”

Introducción

Lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de utilizar este taburete de baño.

Este manual contiene información importante sobre seguridad y consejos sobre el uso y el cuidado adecuados de la silla de ducha / aseo.

Si tiene alguna consulta o en el caso que el producto esté deteriorado, contacte con su proveedor.

Con la adquisición de este accesorio de asistencia para la ducha / aseo, obtiene un producto de primera calidad que le facilitará el aseo. Este manual de instrucciones le ayudará a familiarizarse con el manejo y el funcionamiento del accesorio de asistencia para la ducha / aseo y así sentirse más seguro.



Esperamos que disfrute de su nuevo producto.

Componentes de la silla de ducha / aseo.

- 1.- Respaldo.
- 2.- Asiento en herradura.
- 3.- Reposabrazos abatibles.
- 4.- Reposapiés abatible.
- 5.- Ruedas delanteras
- 6.- Ruedas traseras.
- 7.- Tensores.
- 8.- Bloqueo ruedas traseras



Descripción de los componentes

- Respaldo
Provisto de un asa para facilitar el manejo de la silla.
- Asiento
Asiento en forma de herradura para mejorar la higiene.
- Reposabrazos abatibles
Permiten un buen apoyo al usuario cuando están bajados y reducen el espacio de almacenamiento una vez elevados
- Reposapiés abatible.
Permiten un buen apoyo al usuario cuando están bajados y reducen el espacio de almacenamiento una vez elevados
- Ruedas delanteras.
Con giro de 360 grados, facilitan la movilidad.
- Ruedas Traseras.
Con giro de 360 grados, facilitan la movilidad. También disponen de sistema de freno.
- Tensores.
Proporcionan la rigidez necesaria una vez que la silla está desplegada y dispuesta para su uso.
- Bloqueo ruedas traseras.
Proporcionan seguridad a la hora de sentarse y levantarse el usuario, evitando que la silla se pueda desplazar.

Utilización

La silla de ruedas para ducha EP SBPH01 “ERCINA” es una herramienta para el cuidado y aseo de pacientes y residentes. Su maniobrabilidad hace de esta silla un producto muy fácil de utilizar.

Indicada para personas con inestabilidad o incapacidad de mantenerse en pie, por una menor utilización o una falta de funcionalidad de las extremidades inferiores (p. ej., por la pérdida de fuerza a causa de enfermedades malignas, así como enfermedades pulmonares y cardiovasculares avanzadas y crónicas) combinado con una debilidad postural del tronco.

Se recomienda la ayuda de otra persona para sentarse y levantarse.

Sentarse / Levantarse.

El cuidador pliega el reposapiés en casa de que fuera necesario.

El paciente permanece erguido y se sostiene apoyándose en un punto fijo, por ejemplo una cama o una barandilla.

El cuidador empuja la silla Ercina hasta situarla detrás del paciente.

Durante la transferencia del paciente, la silla Ercina deberá tener los frenos puestos. Para bloquear las ruedas traseras simplemente pise la pestaña saliente sobre la rueda.

El paciente puede sentarse.

Para levantarse, siga los mismos pasos en orden inverso. El desbloqueo de las ruedas se realiza levantando la pestaña.

Antes de desplazar a un paciente en la silla Ercina, asegúrese de que el reposapiés está desplegado y los pies del paciente sobre el mismo. Proteja al paciente cuando suba o baje los reposabrazos. Cuando se bajan los reposabrazos tenga cuidado de no pillarse los dedos.

Mantenimiento y limpieza

Mantenimiento

Para que su silla de ducha esté en perfectas condiciones de uso, debe hacer unas comprobaciones periódicas para asegurarse de que los pernos, tuercas y otros componentes se encuentran intactos y apretados, ya que con el uso se pueden aflojar.

Limpieza

Para limpiar la silla de ducha, utilice únicamente detergentes suaves. Para limpiar la estructura utilice un trapo suave.

Compruebe con regularidad que las ruedas no tengan cabellos o pelusas, y retírelos si fuera necesario.

Si la silla de ducha va a ser utilizada por otro usuario debe limpiar todas las partes que entraron en contacto con el anterior paciente con algún desinfectante.

GARANTÍA

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.

Distribuido por:

EUROPODEX SL.

Licencia nº: 4672 P.S.

Polígono Promosa – Calle W5, nave 13

33211 Gijón - Asturias – ESPAÑA –

TEL. 985990833 FAX. 985 990263

ventas@europodex.com

www.europodex.com