



EUROPODEX
Fabricante nacional e importador
de productos sanitarios ortopédicos
(Nº licencia 4672 P.S.)
www.europodex.com
ventas@europodex.com

Silla de Baño Cymam

Modelo “ALBA”

Introducción



Lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de utilizar esta silla de baño.

Este manual contiene información importante sobre seguridad y consejos sobre el uso y el cuidado adecuados de la silla de baño.

Si tiene alguna consulta o en el caso que el producto esté deteriorado, contacte con su proveedor.

Con la adquisición de este accesorio de asistencia para la ducha, obtiene un producto de primera calidad que le facilitará el aseo. Este manual de instrucciones le ayudará a familiarizarse con el manejo y el funcionamiento del accesorio de

asistencia para la ducha y así sentirse más seguro.

Esperamos que disfrute de su nuevo producto.

Componentes de la silla de baño

1.- Respaldo

2.- Asiento

3.- Patas regulables





EUROPODEX
Fabricante nacional e importador
de productos sanitarios ortopédicos
(Nº licencia 4672 P.S.)
www.europodex.com
ventas@europodex.com

Descripción de los componentes

- Respaldo

Respaldo anatómico fabricado en materiales plásticos.

- Asiento

Asiento anatómico con desagües y asideras integradas para mejorar la higiene y la seguridad.

- Patas Regulables

Las patas extensibles, permiten graduar la altura del asiento y sus conteras de caucho lo dotan de gran estabilidad al ser antideslizantes. Patas en ángulo con conteras de succión que ofrecen estabilidad adicional.

Utilización

La silla de ducha EP SBC01 "ALBA" está exclusivamente diseñada para sentarse durante la ducha.

Indicada para personas con inestabilidad o incapacidad de mantenerse en pie, por una menor utilización o una falta de funcionalidad de las extremidades inferiores (p. ej., por la pérdida de fuerza a causa de enfermedades malignas, así como enfermedades pulmonares y cardiovasculares avanzadas y crónicas) combinado con una debilidad postural del tronco.

Se recomienda la ayuda de otra persona para sentarse y levantarse.

Ajuste las 4 patas a la misma altura.

Asegúrese de la correcta colocación de los pernos de retención.

La superficie de asiento solo sirve para sentarse.





EUROPODEX
Fabricante nacional e importador
de productos sanitarios ortopédicos
(Nº licencia 4672 P.S.)
www.europodex.com
ventas@europodex.com

Montaje y ajuste

Una vez fuera del embalaje, comenzaremos por acoplar los dos tubos en forma de L. Las sillas de ducha vienen con el respaldo desmontado. Para montarlo debe utilizar los tornillos incluidos en la caja.

Coloque el respaldo centrando los agujeros de los tubos del respaldo con los de los tubos de las patas. Una vez centrado puede colocar los tornillos y apretarlos.

Para ajustar la altura de las patas presione el perno de retención y desplace la base telescópica hasta la posición deseada. Al quedar cubierto, el perno de retención encaja automáticamente con el orificio de bloqueo. Las cuatro bases deben ajustarse a la misma altura.

Mantenimiento y limpieza

Mantenimiento

Para que su silla de baño esté en perfectas condiciones de uso, debe hacer unas comprobaciones periódicas para asegurarse de que los pernos, tuercas y otros componentes se encuentran intactos y apretados, ya que con el uso se pueden aflojar.

Limpieza

Para limpiar la silla de baño, utilice únicamente detergentes suaves. Para limpiar la estructura utilice un trapo suave.

Si la silla de baño va a ser utilizada por otro usuario debe limpiar todas las partes que entraron en contacto con el anterior paciente con algún desinfectante.

GARANTÍA

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.





EUROPODEX
Fabricante nacional e importador
de productos sanitarios ortopédicos
(Nº licencia 4672 P.S.)
www.europodex.com
ventas@europodex.com

Distribuido por:

EUROPODEX SL.

Licencia nº: 4672 P.S.

Avenida del Llano nº 57 Gijón

33209 Asturias – ESPAÑA –

TEL. 985990833 FAX. 985 990263

ventas@europodex.com

www.europodex.com

Fabricado por:

CAREMAX REHABILITATION EQUIPMENT CO., LTD

Shugang Rd. Pingnan Industrial Area, Nanhai District, Foshan City, Guangdong, China

Representante Legal en U.E.:

Lotus Global Co., Ltd

1 Four Seasons Terrace, West Drayton, Middlesex, London, UB7 9GG, United Kingdom

