



EUROPODEX
Fabricante nacional e importador
de productos sanitarios ortopédicos
(Nº licencia 4672 P.S.)
www.europodex.com
ventas@europodex.com

Taburete de Baño en Herradura Cymam

Modelo “CARES”

Introducción

Lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de utilizar este taburete de baño.

Este manual contiene información importante sobre seguridad y consejos sobre el uso y el cuidado adecuados del taburete de baño.

Si tiene alguna consulta o en el caso que el producto esté deteriorado, contacte con su proveedor.



Con la adquisición de este accesorio de asistencia para el baño, obtiene un producto de primera calidad que le facilitará el aseo. Este manual de instrucciones le ayudará a familiarizarse con el manejo y el funcionamiento del accesorio de asistencia para el baño y así sentirse más seguro.

Esperamos que disfrute de su nuevo producto.

Componentes del taburete de baño

1.- Asiento

2.- Patas regulables

Descripción de los componentes

- Asiento

Asiento anatómico con desagües y forma de herradura para mejorar y facilitar la higiene.

- Patas Regulables





EUROPODEX
Fabricante nacional e importador
de productos sanitarios ortopédicos
(Nº licencia 4672 P.S.)
www.europodex.com
ventas@europodex.com

Las patas extensibles, permiten graduar la altura del asiento y sus conteras de caucho lo dotan de gran estabilidad al ser antideslizantes.

Utilización

El taburete de ducha EP TBH01 "CARES" está exclusivamente diseñada para sentarse durante el baño.

Indicada para personas con inestabilidad o incapacidad de mantenerse en pie, por una menor utilización o una falta de funcionalidad de las extremidades inferiores (p. ej., por la pérdida de fuerza a causa de enfermedades malignas, así como enfermedades pulmonares y cardiovasculares avanzadas y crónicas) combinado con una debilidad postural del tronco.

Se recomienda la ayuda de otra persona para sentarse y levantarse.

Ajuste las 4 patas a la misma altura.

Asegúrese de la correcta colocación de los pernos de retención.

La superficie de asiento solo sirve para sentarse.

Para ajustar la altura de las patas presione el perno de retención y desplace la base telescópica hasta la posición deseada. Al quedar cubierto, el perno de retención encaja automáticamente con el orificio de bloqueo. Las cuatro bases deben ajustarse a la misma altura.

Montaje y ajuste

Las sillas de ducha vienen con el respaldo desmontado. Para montarlo debe utilizar los tornillos incluidos en la caja.

Coloque el respaldo centrando los agujeros de los tubos del respaldo con los de los tubos de las patas. Una vez centrado puede colocar los tornillos y apretarlos.

Para ajustar la altura de las patas presione el perno de retención y desplace la base telescópica hasta la posición deseada. Al quedar cubierto, el perno de retención encaja automáticamente con el orificio de bloqueo. Las cuatro bases deben ajustarse a la misma altura.





EUROPODEX
Fabricante nacional e importador
de productos sanitarios ortopédicos
(Nº licencia 4672 P.S.)
www.europodex.com
ventas@europodex.com

Mantenimiento y limpieza

Mantenimiento

Para que su taburete de baño esté en perfectas condiciones de uso, debe hacer unas comprobaciones periódicas para asegurarse de que los pernos, tuercas y otros componentes se encuentran intactos y apretados, ya que con el uso se pueden aflojar.

Limpieza

Para limpiar el taburete de baño, utilice únicamente detergentes suaves. Para limpiar la estructura utilice un trapo suave.

Si el taburete de baño va a ser utilizado por otro usuario debe limpiar todas las partes que entraron en contacto con el anterior paciente con algún desinfectante.

GARANTÍA

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.





EUROPODEX
Fabricante nacional e importador
de productos sanitarios ortopédicos
(Nº licencia 4672 P.S.)
www.europodex.com
ventas@europodex.com

Distribuido por:

EUROPODEX SL.

Licencia nº: 4672 P.S.

Avenida del Llano nº 57 Gijón

33209 Asturias – ESPAÑA –

TEL. 985990833 FAX. 985 990263

ventas@europodex.com

www.europodex.com

Fabricado por:

CAREMAX REHABILITATION EQUIPMENT CO., LTD

Shugang Rd. Pingnan Industrial Area, Nanhai District, Foshan City, Guangdong, China

Representante Legal en U.E.:

Lotus Global Co., Ltd

1 Four Seasons Terrace, West Drayton, Middlesex, London, UB7 9GG, United Kingdom

