



INSTRUCCIONES DE USO

ANDADOR cymam® CON ASIENTO

MODELO "OSCOS"



Referencia: EPAA01 – ANDADOR CYMAM CON ASIENTO -PRODUCTO SANITARIO CLASE I

Revisión instrucciones de uso: 2021-05



INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir el **producto sanitario (Medical Device)** andador de acero, plegable y con asiento “Oscos” de la marca **Cymam®**, que cumple con la legislación europea en vigor sobre productos sanitarios.

⚠ Lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de utilizar este producto. Este manual contiene información importante sobre seguridad y consejos sobre el uso y los cuidados adecuados del andador “Oscos”. Si tiene alguna duda póngase en contacto con su vendedor o con un técnico especialista.

Con la adquisición de este producto de ayuda para caminar, obtiene un producto de primera calidad que le facilitará la movilidad. Este manual de instrucciones le ayudará a familiarizarse con su manejo y funcionamiento.

⚠ Nota: Compruebe antes de utilizar el producto que ninguno de sus componentes esté deteriorado o hayan sufrido algún daño en el transporte. En ese caso no utilice el producto y póngase en contacto con su proveedor.

⚠ ADVERTENCIAS GENERALES

- **Está prohibido utilizar este producto con otros fines distintos para los cuales ha sido fabricado y que se definen en este manual.**
- **El fabricante no se responsabiliza de los daños provocados por un uso incorrecto o un uso distinto al indicado en este manual.**
- **El fabricante se reserva el derecho de realizar mejoras en este producto y en este manual, sin previo aviso, con el fin de realizar mejoras sobre los mismos.**
- **Mantener el producto lejos de una fuente de calor, incluido cuando se encuentre con su embalaje.**
- **La vida útil del dispositivo está condicionada por el desgaste de las partes no sustituibles o no reparables.**
- **La adaptación de este producto sanitario debe de realizarse por un médico o técnico especialista, para regular la altura del andador, garantizar la activación del freno y del buen funcionamiento y uso en general.**
- **Este producto sanitario debe ser utilizado por personas que tengan capacidad motora y cognitiva suficiente para utilizarlo sin riesgos.**
- **Las reclamaciones relativas a la garantía solo pueden efectuarse a través del distribuidor en el que se adquirió el producto.**
- **En caso de incidente grave que se verifique con el uso de este producto debe de comunicárselo inmediatamente al fabricante y a la autoridad competente en el Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o el paciente.**

FINALIDAD PREVISTA

El andador “Oscos” de Cymam® es un producto sanitario de apoyo a la movilidad de personas, cuya finalidad es la ayuda a la deambulación, aportando estabilidad y seguridad durante la marcha.

Está indicado para aquellos usuarios con movilidad reducida, que presentan un déficit de movilidad, dificultad motora, problemas de equilibrio o que requieran cualquier tipo de apoyo en la deambulación. Está recomendado utilizarlo en interiores y para desplazamientos cortos, sobre superficies planas y sin desnivel.

⚠ El peso máximo de usuario es de 100kg. No está permitido el uso para transportar personas u objetos.

DESCRIPCIÓN DEL ANDADOR Y SUS COMPONENTES

El andador Cymam® con asiento, es un andador de acero, plegable y con asiento que se caracteriza por tener las siguientes partes:

- Empuñadura anatómica (1)
- Asiento abatible. (2)
- Ruedas de PVC macizas de 110mm, situadas en el interior del andador para minimizar su ancho total. (3)
- Conteras de 22mm (4)

MONTAJE Y AJUSTE

- **Despliegue del andador**

Apoye el andador en el suelo sobre las conteras, y, presione la varilla central que une las bisagras de plegado hasta que éstas queden completamente extendidas. En este momento podemos girar el asiento para que ocupe su posición sobre las dos barras transversales que unen los extremos del cuadro.

- **Montaje y regulación de las empuñaduras**

Inserte los tubos en la estructura. Regule la altura de la empuñadura según las indicaciones del médico o técnico especialista. Coloque el pasador y asegúrese de que la mariposa queda perfectamente apretada.

⚠ Asegúrese que las empuñaduras están alineadas con la dirección de las ruedas, ya que existe el peligro de vuelco o pérdida de estabilidad. Verifique que ambas empuñaduras estén a la misma altura.

- **Plegado**

Abata el asiento y tire hacia arriba desde el centro de la varilla que une las bisagras de plegado, teniendo precaución de que éstas no atrapen ninguna prenda ni parte del cuerpo.



ANTES DE CADA USO

Verificar que todos los componentes estén en perfectas condiciones de uso, con especial atención a las ruedas, empuñaduras y conteras.

MODO DE USO

Comenzar la marcha con ambas manos en las empuñaduras y en posición erguida con la mirada hacia adelante y no hacia abajo. Mantener el andador cerca del cuerpo para evitar caídas y cargas inadecuadas.

⚠ ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO

- Este producto ha sido diseñado para ser utilizado por un único usuario.
- Las ruedas y conteras deben estar en contacto con el suelo para garantizar la estabilidad del andador. Antes de sentarse, asegúrese de que el andador está en una posición segura.
- Apoyarse siempre sobre ambos manillares, tanto en la marcha como al levantarse del asiento.
- No utilice el asiento del andador para trasladar cosas o personas. No cuelgue bolsas ni otros artículos de las empuñaduras. Podría producirse inestabilidad y/o vuelco del andador.
- Utilice el andador solo sobre superficies sólidas y planas. Tenga especial cuidado en el paso de bordillos, evitando aquellos más altos. No utilice el andador para subir escaleras. Tenga especial atención cuando se utiliza el producto sobre una superficie húmeda.
- No almacene o deje el producto en el exterior.
- Al plegar el andador Cymam®, asegúrese de que ninguna parte de la ropa o del cuerpo puede quedar atrapada.
- Tenga en cuenta que las partes acolchadas del andador Cymam® (tanto las empuñaduras, como el asiento y el respaldo) expuestas a la luz solar directa se calientan y pueden causar quemaduras en la piel por contacto. Por ello, es recomendable cubrir todas esas partes o proteger el andador de la luz solar directa.

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA y DESINFECCIÓN

Mantenimiento

Realice comprobaciones periódicas para asegurarse de que todos los componentes (pernos, tuercas, empuñaduras, ruedas, conteras... etc.) se encuentran correctamente ajustados y en perfecto estado de uso.

Limpieza y Desinfección

Para limpiar, utilice únicamente detergentes neutros y séquelo con un trapo suave. Si es necesaria su desinfección el limpiar todas las partes con un producto desinfectante no abrasivo.

⚠ No utilizar productos abrasivos que puedan deteriorar los componentes del andador. El fabricante no se hará responsable de los deterioros que sean originados por un mantenimiento y/o limpieza incorrectos.

ELIMINACIÓN SEGURA

No eliminar el producto junto a los residuos sólidos urbanos. Entréguelo en el punto limpio siguiendo la normativa vigente en el lugar de entrega.

SIMBOLOGÍA UTILIZADA

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|------------------------------------|--|--|---|----------------------|
|  | Fabricante |  | Fecha de fabricación |  | Advertencia/Atención. |  | Instrucciones de uso |
|  | Marcado CE |  | Número de lote |  |  Importador |  | Referencia |
|  | Medical Device (producto sanitario) |  | Representante autorizado sanitario | | | | |

DATOS TÉCNICOS

Ancho asiento: 40 cm. **Fondo asiento cm.:** 20 cm. **Altura asiento-suelo:** 54 cm. **Altura total:** 73-93 cm

Ancho total: 58 cm **Fondo total:** 58 cm **Peso producto:** 5.6 kg **Peso máximo usuario:** 100Kg.

GARANTÍA

La garantía se extenderá durante el periodo indicado según la legislación vigente en el momento de la venta del artículo y que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido, abuso o modificación del producto o incumplimiento de las instrucciones de uso, así como errores de instalación. El uso previsto se explica en este manual. Europodex S.L. no se hace responsable de daños, lesiones personales o consecuencias derivadas de errores de instalación y de un uso no conforme a lo descrito en estas instrucciones de uso. Europodex S.L. no garantiza los productos contra daños provenientes de: reparaciones o mantenimiento no autorizadas, omisión de mantenimiento, catástrofe natural, si está previsto problemas derivados del suministro eléctrico. La garantía no cubre las piezas derivadas del desgaste normal del producto.

REPARACIONES

En caso de reparación por garantía, será EUROPODEX S.L. quien realizará la evaluación si el defecto está cubierto por la misma. Una reparación o sustitución no renueva ni proroga la garantía. Utilice solo repuestos y accesorios originales.

IMPORTADO POR:

EUROPODEX S.L (licencia nº:4672 P.S)

C/ W-5 Nave 13 P.I. Promosa

33211, Gijón Asturias – ESPAÑA

TEL. 985990833 FAX. 985990263 ventas@europodex.com CONSULTE MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRA WEB www.europodex.com