



INSTRUCCIONES DE USO

ELEVADOR DE INODORO cymam®



Referencias: EPEI10 – EPEI10T – EPEI15 – EPEI15T-ELEVADOR DE INODORO- PRODUCTO SANITARIO CLASE I

Revisión instrucciones de uso: 2021-05

INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir el **producto sanitario (Medical Device)**, elevador de inodoro de la marca **Cymam®**. Este manual hace referencia a los siguientes elevadores cuyas referencias son:

- **EPEI10: Elevador de inodoro Cymam® de 10cm.**
- **EPEI15: Elevador de inodoro Cymam® de 15cm.**
- **EPEI10T: Elevador de inodoro Cymam® de 10cm con tapa.**
- **EPEI15T: Elevador de inodoro Cymam® de 15cm con tapa.**

⚠ Lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de utilizar este producto. Este manual contiene información importante sobre seguridad y consejos sobre el uso y el cuidado adecuados del producto. **Si tiene alguna duda póngase en contacto con su vendedor o con un técnico especialista.**

Con la adquisición de este producto de asistencia para el baño, obtiene un producto de primera calidad que le facilitará la utilización del inodoro. Este manual de instrucciones le ayudará a familiarizarse con el manejo y el funcionamiento.

⚠ **Nota: Compruebe antes de utilizar el producto que ninguno de sus componentes esté deteriorado o haya sufrido algún daño en el transporte. En ese caso no utilice el producto y póngase en contacto con su proveedor.**

⚠ ADVERTENCIAS GENERALES

- **Está prohibido utilizar este producto con otros fines distintos para los cuales ha sido fabricado y que se definen en este manual.**
- **El fabricante no se responsabiliza de los daños provocados por un uso incorrecto o un uso distinto al indicado en este manual.**
- **El fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones en este producto y en este manual, sin previo aviso, con el fin de realizar mejoras sobre los mismos.**
- **Mantenga el producto lejos de una fuente de calor, incluido cuando se encuentre con su embalaje.**
- **Prestar atención si hay niños presentes.**
- **La vida útil del dispositivo está condicionada por el desgaste de las partes no sustituibles o no reparables.**
- **La adaptación y los ajustes de este producto sanitario debe de realizarse por un médico o técnico especialista**
- **Las reclamaciones relativas a la garantía sólo pueden efectuarse a través del distribuidor en el que se adquirió el producto.**
- **En caso de incidente grave que se verifique con el uso de este producto debe de comunicárselo inmediatamente al fabricante y a la autoridad competente en el Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o el paciente.**

FINALIDAD PREVISTA

El elevador de baño es un producto de apoyo para el aseo y su finalidad es ayudar a las personas que tengan dificultad a la hora de levantarse y de sentarse en el inodoro (WC), al suplementar su altura en 10 o 15cm.

Indicada para usuarios de sillas de ruedas, personas con movilidad reducida por patología de rodilla, y cadera y en general a todas las personas que pudiesen tener dificultades para sentarse y/o levantarse del inodoro.

⚠ El peso máximo de usuario es 100kg.

DESCRIPCIÓN DEL TABURETE DE BAÑO Y SUS COMPONENTE

1. Anclaje.

Sistema que permite ajustar en ambos lados el elevador al inodoro.

2. Elevador.

Pieza fabricada en PE (polietileno) disponible en dos alturas, 10 y 15cm.

3. Tapa.

Tapa que da un aspecto más higiénico al inodoro.



MONTAJE Y AJUSTE

La instalación del inodoro no requiere la utilización de herramienta específica. Todo lo que necesita para su montaje y puesta en funcionamiento se incluye junto al embalaje, en una caja de cartón, con los siguientes elementos:

1. Elevador.
2. Bolsa con 2 piezas de ajuste por presión.



ANTES DE CADA USO

Verificar que elevador está en perfectas condiciones.

Verificar que el elevador, una vez colocado en el inodoro, está en posición estable y correctamente fijado mediante las piezas de presión.

⚠ ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO

- Antes de su uso verifique que el elevador está en una posición estable en el inodoro y correctamente fijado mediante las piezas de presión.
- Este producto ha sido diseñado para ser utilizado por un único usuario.
- Realice comprobaciones periódicas para asegurarse de que las piezas de presión giran correctamente para su ajuste sobre el inodoro.
- Compruebe periódicamente el estado de las conteras. Si necesita cambiarlas, utilice recambios originales.
- Tenga especial cuidado en los componentes salientes, para evitar posibles lesiones.
- La superficie de asiento solo sirve para sentarse.
- No utilizar el elevador por encima del peso indicado. Peso máximo de usuario: 100kg
- No almacene o deje el producto en el exterior.

MODO DE USO

Sentarse distribuyendo el peso sobre todo el elevador. Para levantarse, **procure no llevar el peso hacia delante**, ya que puede causar pérdida de equilibrio. Se recomienda la ayuda de otra persona o de una asidera.

⚠ En caso de inestabilidad o peligro de caída, ayúdese de otra persona para sentarse y levantarse.

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA y DESINFECCIÓN

Mantenimiento

⚠ Para que su elevador de inodoro esté en perfectas condiciones de uso, debe hacer unas comprobaciones periódicas para asegurarse de que las piezas de presión se encuentran en buen estado de funcionamiento y que el elevador no presenta roturas ni grietas.

Limpieza y Desinfección

Para limpiar el elevador de inodoro, utilice únicamente detergentes neutros y séquelo con un trapo suave. Si es necesaria su desinfección limpie todas las partes con un producto desinfectante no abrasivo.

⚠ No utilizar productos abrasivos que puedan deteriorar las partes plásticas. El fabricante no se hará responsable de los deterioros que sean originados por un mantenimiento y/o limpieza incorrectos.

ELIMINACIÓN SEGURA

No eliminar el producto junto a los residuos sólidos urbanos. Entréguelo en el punto limpio siguiendo la normativa vigente en el lugar de entrega.

SIMBOLOGÍA UTILIZADA

 Fabricante	 Fecha de fabricación	 Advertencia/Atención.	 Instrucciones de uso
 Marcado CE	 Número de lote	 Importador	 Referencia
 Medical Device (producto sanitario)		 Representante autorizado sanitario	

DATOS TÉCNICOS

Referencia	EPEI10	EPEI10T	EPEI5	EPEI15T
Alto Asiento	10cm	10cm	15cm	15cm
Ancho Asiento	42cm	42cm	42cm	42cm
Fondo Asiento	39cm	39cm	39cm	39cm
Altura total	10cm	11cm	15cm	16cm
Peso producto	1,2kg	1,2kg	1,2kg	1,2kg
Peso máximo usuario	100kg	100kg	100kg	100kg

GARANTÍA

La garantía se extenderá durante el periodo indicado según la legislación vigente en el momento de la venta del artículo y que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido, abuso o modificación del producto o incumplimiento de las instrucciones de uso, así como errores de instalación. El uso previsto se explica en este manual. Europodex S.L. no se hace responsable de daños, lesiones personales o consecuencias derivadas de errores de instalación y de un uso no conforme a lo descrito en estas instrucciones de uso. Europodex S.L. no garantiza los productos contra daños provenientes de: reparaciones o mantenimiento no autorizadas, omisión de mantenimiento, catástrofe natural, si está previsto problemas derivados del suministro eléctrico. La garantía no cubre las piezas derivadas del desgaste normal del producto.

REPARACIONES

En caso de reparación, será EUROPODEX S.L. quien evaluará si el defecto está cubierto por la garantía. Una reparación o sustitución no renueva ni prorroga la garantía.

IMPORTADO POR:

EUROPODEX S.L (licencia nº:4672 P.S)

C/W5, Nave 13, P.I. Promosa

33211, Gijón Asturias – ESPAÑA