



INSTRUCCIONES DE USO

MULETA AXILAR cymam®



Referencia EPMAL, EPMAM, EPMAS – MULETA AXILAR- PRODUCTO SANITARIO CLASE I

Revisión instrucciones de uso: 2021-05

INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir el **producto sanitario (Medical Device)**, Muleta axilar de la marca **Cymam®**. con las siguientes referencias:

- **EPMAL: Muleta axilar de talla L.**
- **EPMAM: Muleta axilar de talla M.**
- **EPMAS: Muleta axilar de talla S.**

⚠ Lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de utilizar este producto. Este manual contiene información importante sobre seguridad y consejos sobre el uso y el cuidado adecuados del producto. **Si tiene alguna duda póngase en contacto con su vendedor o con un técnico especialista.**

Con la adquisición de este producto de asistencia para la movilidad, obtiene un producto de primera calidad que le facilitará la deambulaci3n. Este manual de instrucciones le ayudar3 a familiarizarse con su manejo y funcionamiento.

⚠ **Nota: Compruebe antes de utilizar el producto que ninguno de sus componentes est3 deteriorado o haya sufrido alg3n da3o en el transporte. En ese caso no utilice el producto y p3ngase en contacto con su proveedor.**

⚠ ADVERTENCIAS GENERALES

- Est3 prohibido utilizar este producto con otros fines distintos para los cuales ha sido fabricado y que se definen en este manual.
- El fabricante no se responsabiliza de los da3os provocados por un uso incorrecto o un uso distinto al indicado en este manual.
- El fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones en este producto y en este manual, sin previo aviso, con el fin de realizar mejoras sobre los mismos.
- Mantenga el producto lejos de una fuente de calor, incluido cuando se encuentre con su embalaje.
- Prestar atenci3n si hay ni3os presentes.
- La vida 3til del dispositivo est3 condicionada por el desgaste de las partes no sustituibles o no reparables.
- La adaptaci3n y los ajustes de este producto sanitario debe de realizarse por un m3dico o t3cnico especialista
- Las reclamaciones relativas a la garant3a solo pueden efectuarse a trav3s del distribuidor en el que se adquiri3 el producto.
- En caso de incidente grave que se verifique con el uso de este producto debe de comunic3rsele inmediatamente al fabricante y a la autoridad competente en el Estado miembro en el que est3n establecidos el usuario y/o el paciente.

FINALIDAD PREVISTA

La muleta axilar EPMAL, EPMAM Y EPMAS es un producto de apoyo para la movilidad y su finalidad es facilitar la deambulaci3n. Permite el apoyo sobre el tronco, aportando estabilidad al usuario.

Indicada para personas con dificultad de movimiento y/o inestabilidad, patolog3a o postoperatorio de miembro inferior (rodilla, tobillo...) o cualquier patolog3a que afecte al caminar. Puede utilizar una o dos muletas, seg3n le indique su especialista.

⚠ El peso m3ximo de usuario es 100kg.

DESCRIPCI3N DE LA MULETA AXILAR Y SUS COMPONENTES

Las muletas axilares est3n fabricadas en aluminio, lo que les confiere ligereza y resistencia. Poseen doble regulaci3n (la altura de la empu3adura y la altura de pu3o a suelo) y contera de caucho. Est3 disponible en 3 alturas: L, M y S.

1. Almohadilla axilar.

Almohadilla anatómica fabricada en caucho.

2. Empuñadura.

Permite regulación en 5 alturas para una correcta adaptación a cada usuario.

3. Asta de altura regulable.

Permite regulación en 9 alturas para una correcta adaptación a cada usuario.

4. Contera.

Fabricada en caucho para proporcionar un buen agarre.



MONTAJE Y AJUSTE

Este producto no requiere montaje.

Para ajustar la altura axilar de las muletas presione el perno de retención y desplace el asta base telescópica hasta la posición deseada. Al quedar cubierto, el perno de retención encaja automáticamente con el orificio de bloqueo inmediatamente superior.

ANTES DE CADA USO

Verificar que el producto está en perfectas condiciones y que tanto los pernos de bloqueo como la palomilla de regulación de la empuñadura se encuentran correctamente situados y apretados.

⚠️ ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO

- Este producto ha sido diseñado para ser utilizado por un único usuario.
- La adaptación debe realizarla un técnico especialista, que a su vez le explicará el modo de uso.
- Asegúrese de la posición de la muleta, no presione el nervio axilar para evitar disfunciones del mismo. Siga las indicaciones del especialista.
- Evite terrenos húmedos, pendientes y terrenos irregulares para evitar posibles caídas.
- Los materiales utilizados en este producto son hipoalergénicos, pero cabe la posibilidad de que surjan problemas de hipersensibilización con algunos de sus componentes (alergias, dermatitis de contacto...), en ese caso acuda al médico o técnico correspondiente.
- En un uso prolongado o a largo plazo pueden aparecer patologías de compresión en muñeca, dedos y codo.
- Realice comprobaciones periódicas para asegurarse los componentes se encuentran intactos y ajustados, ya que con el uso se pueden aflojar.
- Compruebe periódicamente el estado de las conteras. Si necesita cambiarlas, utilice recambios originales.
- No utilizar las muletas axilares por encima del peso indicado. Peso máximo de usuario: 100kg
- No almacene o deje el producto en el exterior.

MODO DE USO

⚠️ La adaptación debe realizarla un técnico especialista, que a su vez le explicará el modo de uso

Puede usar 1 ó 2 muletas, según le indique el especialista.

La parte superior de las muletas deberían estar aproximadamente 2 dedos (alrededor de 5 centímetros) por debajo de las axilas. Coloque su peso sobre las manos. La parte superior de las muletas no debería presionar sus axilas.

Apoye su peso con los brazos y las manos. No apoye su peso en las axilas. Esto podría lesionar los nervios que están debajo de éstas. Mantenga su codo doblado cuando la muleta esté colocada bajo su brazo

Camine lento y con cuidado al usar las muletas. Suba y baje escaleras y rampas lentamente y deténgase a descansar cuando se sienta fatigado. Proceda con calma para sentarse o pararse.

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA y DESINFECCIÓN

Mantenimiento

⚠ Para que su muleta axilar esté en perfectas condiciones de uso, debe hacer unas comprobaciones periódicas para asegurarse de que los pulsadores y otros componentes se encuentran intactos y apretados, ya que con el uso se pueden aflojar. De la misma manera compruebe periódicamente el estado de las conteras. Si necesita cambiarlas, utilice recambios originales. (Referencia: ER0015)

Limpieza y Desinfección

Para limpiar las muletas axilares, utilice únicamente detergentes neutros y séquelas con un trapo suave. Si es necesaria su desinfección limpie todas las partes con un producto desinfectante no abrasivo.

⚠ No utilizar productos abrasivos que puedan deteriorar las partes plásticas y metálicas.

El fabricante no se hará responsable de los deterioros que sean originados por un mantenimiento y/o limpieza incorrectos.

ELIMINACIÓN SEGURA

No eliminar el producto junto a los residuos sólidos urbanos. Entréguelo en el punto limpio siguiendo la normativa vigente en el lugar de entrega.

SIMBOLOGÍA UTILIZADA

 Fabricante	 Fecha de fabricación	 Advertencia/Atención.	 Instrucciones de uso
 Marcado CE	 Número de lote	 IMPORTADO POR Importador	REF Referencia
 Medical Device (producto sanitario)	 Representante autorizado sanitario		

DATOS TÉCNICOS

Referencia	EP MAL	EP MAM	EP MAS
Altura mín.-máx.:	134.5 -154cm	113 – 133cm	84 – 114cm
Peso máximo usuario:	100Kg	100Kg	100Kg
Peso del producto	0.9kg	0.8kg	0.75kg

GARANTÍA

La garantía se extenderá durante el periodo indicado según la legislación vigente en el momento de la venta del artículo y que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido, abuso o modificación del producto o incumplimiento de las instrucciones de uso, así como errores de instalación. El uso previsto se explica en este manual. Europodex S.L. no se hace responsable de daños, lesiones personales o consecuencias derivadas de errores de instalación y de un uso no conforme a lo descrito en estas instrucciones de uso. Europodex S.L. no garantiza los productos contra daños provenientes de: reparaciones o mantenimiento no autorizadas, omisión de mantenimiento, catástrofe natural, si está previsto problemas derivados del suministro eléctrico. La garantía no cubre las piezas derivadas del desgaste normal del producto.

REPARACIONES

En caso de reparación, será EUROPODEX S.L. quien evaluará si el defecto está cubierto por la garantía. Una reparación o sustitución no renueva ni prorroga la garantía.

IMPORTADO POR:

EUROPODEX S.L (licencia nº:4672 P.S)

C/ W-5 Nave 13 P.I. Promosa

33211, Gijón Asturias – ESPAÑA